

デントドライS150マイクロミストフィルターエレメント交換方法



①コンプレッサーを停止してエアーを全て抜いてから作業を始めて下さい。


②カップの赤いロックレバーを押しながら「IN」まで回してカップを外します。カップはとてもデリケートな部品がありますので落下など十分にご注意下さい。



③+ネジの下にマジックで位置の印を付けます。元に戻すときに簡単です。



④+ネジを5mmほど出てくるまで緩めます。

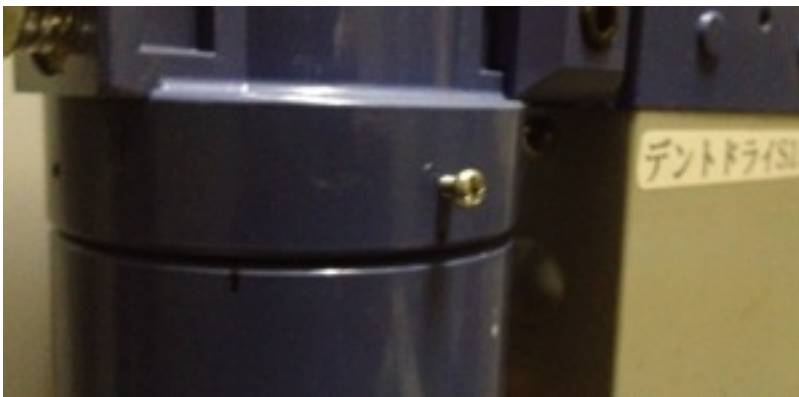

⑤左にゆっくり数センチほど回すと下に外れます。



⑥エレメントを回して外して交換し、元にくみ上げます。